

お客様各位

イマセン簡易形電動車いすの無償点検修理のご案内

株式会社 今仙技術研究所

〒509-0109

岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号

電話番号 058-379-2727 / FAX058-379-2726

謹啓

平素は、イマセン簡易形電動車いすをご愛用頂き厚く御礼申し上げます。

この度、簡易形電動車いす「デイリーパル」について、一部の製品に不具合が発生するおそれがあるため無償点検修理を実施いたします。ご愛用の皆さまには、大変ご迷惑をおかけし、心からお詫び申し上げます。

謹白

不具合の内容

デイリーパルのバッテリーにおいて、内部の基板の配線が誤った経路にて組付けられた可能性があります。その結果、バッテリーを横に倒した状態（内部基板を下にした状態：図1参照）で充電した場合に、基板が故障するおそれがあります。



<図1>

点検及び作業内容

対象のバッテリーについて、内部配線を点検し、正規配線経路であることを確認・修正いたします。

*充電につきましては、推奨いたします縦置き充電（図2参照）を実施していただくようお願いいたします。



<図2>

無償点検修理の開始日（予定）

2021年3月1日より

対象：2018年11月～2019年3月生産分

バッテリー裏面の製造ロット番号をご確認願います（図3参照）。

<対象：製造ロット番号>

2018年11月製

2018年12月製

2019年01月製

2019年02月製

2019年03月製



<図3>

無償点検修理に係るお問合せ

大変ご迷惑をおかけしますが、ご購入先または弊社までお問合せ願います。

以上