


EMC-260/270 型 バッテリ絶縁手順

①車椅子の固定

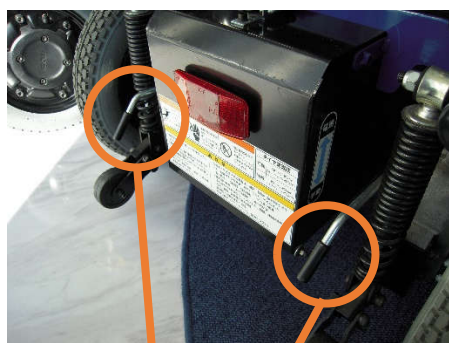

クラッチレバー
電動に切替


はじめに
作業を行う際は、モータのクラッチレバーを電動に切り替えて車輪部が固定された状態で行ってください。

②電源を切る




操作ボックスの電源スイッチを「切」に合わせます。

③カバーをあける

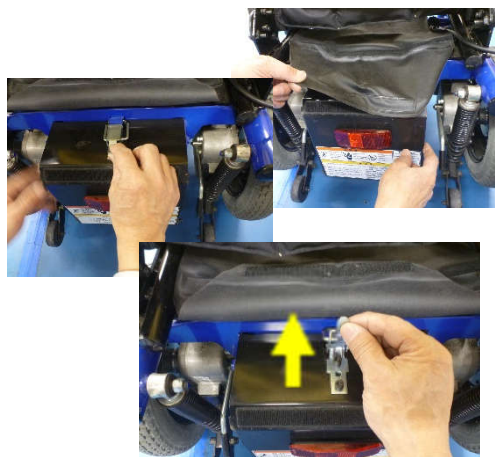

車いす後方のバッテリーケースを開きます。上部のビニールカバーのマジックテープをはがすとロック金具が見えます。ロック金具のレバーを車いす前側に倒してフックを外します。


④コネクタの確認

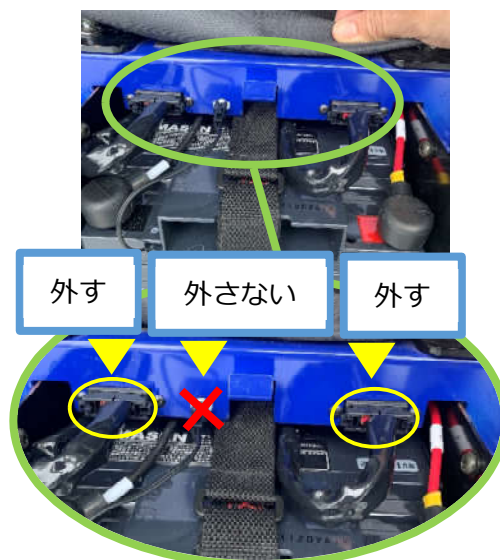

バッテリーの上部に3つのコネクタがあることを確認してください。そのうち中央の小さなコネクタ以外の2つを外します。

EMC-260/270 型 バッテリ絶縁手順

⑤コネクタを抜く

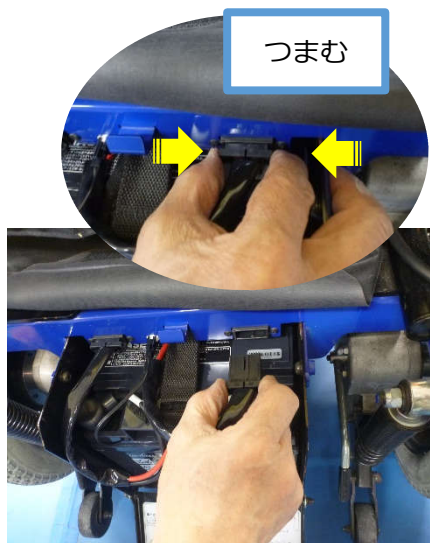

差込側のコネクタの両側には爪がついています。指で両側をつまむとコネクタが抜けます。2つのコネクタの両方を抜いてください。

⑥配線の処理



外した2本のコネクタをバッテリー上部とフレームの隙間に入れ込んで、なるべく動かないようにします。

⑦完了



バッテリーケースを開いたときの逆の手順で閉じます。